



## SPRAY DO JAMY USTNEJ I GARDŁA

WYRÓB MEDYCZNY



### OPIS PRODUKTU

Spray **Lactoangin®** jest specjalistycznym wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania leczenia infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło). **Lactoangin®** nawilża, koi i łagodzi ból.

**Lactoangin®** zawiera metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, głównie kwas mlekowy, octowy, inne kwasy organiczne oraz mentol i olejek miętowy, przez co naturalnie wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło).

Ponadto **Lactoangin®** ułatwia przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w gardle i jamie ustnej, co zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy, powstawania płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł oraz niweluje nieprzyjemny oddech.

### SKŁAD

Składnikami **Lactoangin®** są metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, mentol, olejek miętowy i substancje pomocnicze: glicerol, glikol propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.

**Lactoangin®** stosuje się w celu:

- wspomagania leczenia infekcji jamy ustnej i gardła, w tym kandydozy (drożdżycy),
- łagodzenia bólu gardła,
- nawilżania jamy ustnej i gardła.

Ponadto pomocniczo w stanach **zaburzenia równowagi mikroflory** jamy ustnej i gardła w celu:

- niwelowania nieprzyjemnego oddechu,
- zapobiegania próchnicy,
- zapobiegania tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł.

### DAWKOWANIE

Dzieci powyżej 3. roku życia do ukończenia 6. roku życia: 1 dawka preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 2- 3 dawki preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną.

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.



## SPOSÓB UŻYCIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Unieść aplikator poprzez przekręcenie go na bok.
3. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę w celu napełnienia aplikatora i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
4. Umieścić aplikator w ustach, skierować jego wylot na obszar w jamie ustnej lub gardle i nacisnąć pompkę w celu uwolnienia dawki preparatu. Czynność powtórzyć odpowiednią ilość razy.

## OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. W czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem. Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo. Wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Jeśli po zastosowaniu preparatu pojawią się jakiegokolwiek niepokojące objawy, tj. pieczenie, nasilenie bólu itp. należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

## SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu bezpośrednim w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

## OPAKOWANIE

Butelka z aplikatorem zawierająca 30 g preparatu, w kartoniku z instrukcją używania.

## OKRES WAŻNOŚCI WYROBU

2 lata



Institut Biotechnologii Surowic i Szczepionek  
BIOMED Spółka Akcyjna Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków  
Tel.: + 48 12 37 69 200 Fax: + 48 12 37 69 205  
e-mail: marketing@biomed.pl

## DATA OPRACOWANIA / AKTUALIZACJI

2015-06



Wytwórca



Użyć do



Numer serii



Zajrzyj do  
instrukcji  
używania



Niesterylny



Ograniczenie  
dopuszczalnej  
temperatury